

# Utilisation d'Avance<sup>®</sup> Solo

Ce dont vous devez tenir compte lors du traitement avec le système de thérapie des plaies par pression négative Avance<sup>®</sup> Solo.



Avance<sup>®</sup> Solo  
Guide pour les patients

  
Mölnlycke<sup>®</sup>



# Table des matières

<b>Introduction à la thérapie des plaies par pression négative (TPN)</b> Familiarisez-vous avec Avance® Solo	<b>04-05</b>
Savoir <b>ce que vous devez faire et éviter</b> pendant le traitement avec Avance® Solo	<b>06-07</b>
<b>Informations sur l'utilisation, l'application et le nettoyage</b> de l'appareil médical	<b>08-09</b>
<b>Que signifient les signaux d'alarme ?</b>	<b>10-11</b>

**Scannez le code QR avec la caméra de votre  
téléphone mobile pour accéder au site  
Avance Solo réservé aux patients.**

Vous y trouverez des vidéos d'instructions, des  
documents à télécharger et bien plus encore.



[www.molnlycke.ch/fr-  
ch/avanceforpatients](http://www.molnlycke.ch/fr-ch/avanceforpatients)



**Remarque:** si vous avez d'autres questions concernant la thérapie ou l'appareil,  
adressez-vous à vos professionnels de santé. Dans les situations d'urgence comme  
les saignements ou en cas d'autres problèmes avec l'appareil que vous n'avez pas pu  
résoudre vous-même, adressez-vous immédiatement à votre interlocuteur médical.

Nom: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_

Hotline Avance®: **+41 (0)44 744 54 01** (7 x 24h) \_\_\_\_\_

**Vous êtes traité(e) avec le système par pression négative Avance® Solo de Mölnlycke®. Cette brochure vous informe sur l'utilisation et l'entretien de l'appareil.**

**Veillez la lire attentivement.**

**Quelles sont les différentes composantes d'Avance® Solo?**




## Qu'est-ce que la thérapie des plaies par pression négative (TPN)?

La thérapie des plaies par pression négative (TPN) est une méthode de traitement des plaies par aspiration d'exsudat. Le pansement est posé de façon hermétique et la pompe génère une pression négative qui évacue l'exsudat de la plaie.

## Quels sont les avantages de la thérapie des plaies par pression négative ?

- Elle favorise la cicatrisation de plaies complexes et à cicatrisation lente<sup>1</sup>
- Elle améliore la formation de nouveaux tissus qui favorisent la cicatrisation<sup>1</sup>
- Elle contribue à réduire l'œdème et protège la plaie des contaminations externes<sup>2</sup>

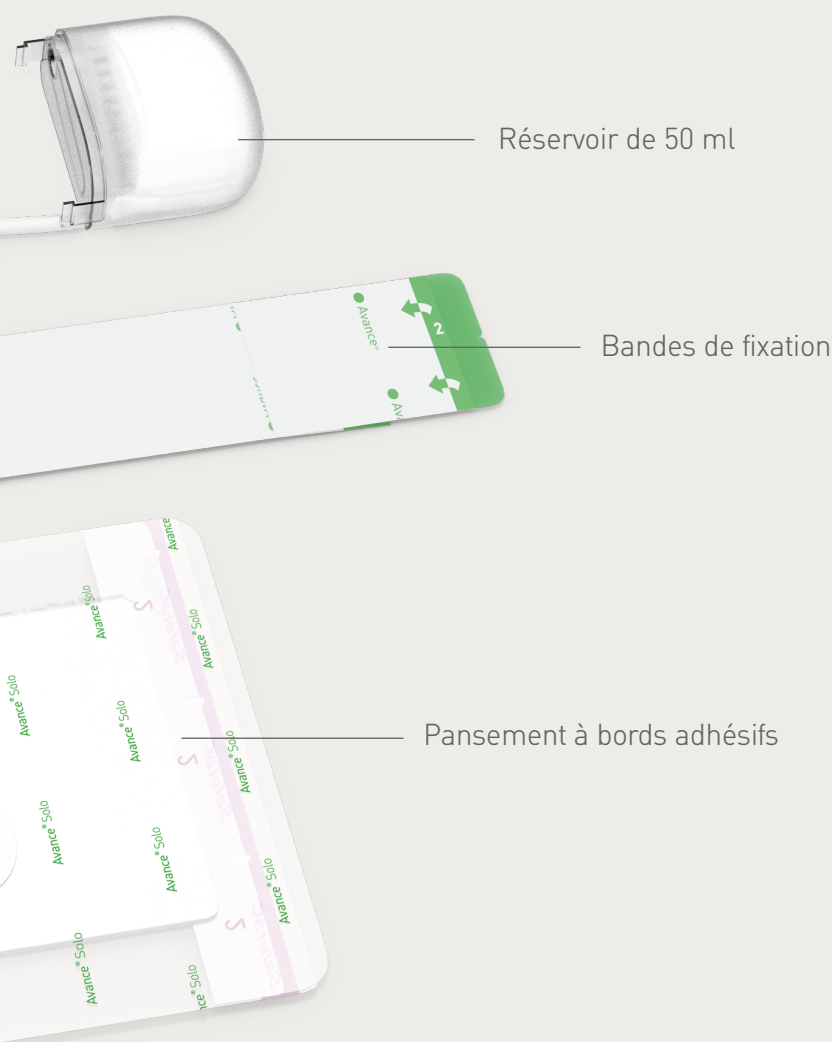

# Ce dont il faut tenir compte lors de l'utilisation d'Avance® Solo

Avance® Solo est un appareil médical qui doit absolument être utilisé avec la plus grande rigueur. Les informations ci-dessous sont tirées du manuel utilisateur qui se trouve dans l'emballage du produit. Les instructions complètes, les avertissements et les précautions sont mentionnés dans le manuel utilisateur.

## Ce que vous ne devriez pas faire:

- Ne changez pas vous-même le pansement.
- Ne mettez pas le pansement, l'appareil, le réservoir ou les tubulures en contact avec un jet d'eau, ne les exposez pas au froid ou à la chaleur (température de service 5 °C à 40 °C).
- Ne plongez jamais le pansement, la pompe, le réservoir ou les tubulures dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil en avion: enlevez les piles pendant les voyages en avion.
- Ne manipulez pas l'appareil.
- Conservez toujours l'appareil hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.

## Caractéristiques importantes:

- Assurez-vous que vous connaissez les alarmes optiques et acoustiques pour l'étanchéité, le blocage et une pile faible qui sont affichées par l'appareil Avance® Solo (liste des signaux et avertissements à la page 11).
- **Les pulsations régulières de la pompe indiquent le fonctionnement correct du système. L'excédent d'exsudat est enlevé pour maintenir la pression négative.**
- Vérifiez si le pansement est rétracté et ferme.
- Si ce n'est pas le cas, veuillez vous adresser à votre professionnel de santé.

## Lors du port et du placement de l'appareil, veillez à ce qui suit:

- Évitez de coincer et de clamber les tubulures et évitez toute strangulation (par ex. tubulure enroulée autour d'une partie du corps).
- Portez ou positionnez toujours le système de telle manière que le réservoir soit dirigé vers le bas (l'exsudat doit pouvoir s'écouler).
- Si vous utilisez le clip de ceinture, veillez à ce qu'il soit bien positionné sur un côté de votre taille.
- Si vous le positionnez devant pour des raisons de confort, enlevez-le avant de vous asseoir pour éviter que la pompe ne se détache du clip de ceinture en raison de la pression exercée.


## Mesures d'hygiène quotidiennes

Pendant le traitement avec Avance® Solo, vous pouvez prendre des douches. Cependant, il est important de ne pas exposer le pansement, l'appareil, le réservoir et les tubulures au jet d'eau. Le pansement proprement dit résiste à la douche. Pour éviter toute contamination, veuillez suivre les instructions ci-dessous relatives à la manipulation correcte de votre appareil.


### Procédez comme suit si vous souhaitez prendre une douche:




- 1
- Mettez la pompe en pause en appuyant sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes.
  - La pompe émet deux signaux sonores pour confirmer le mode pause

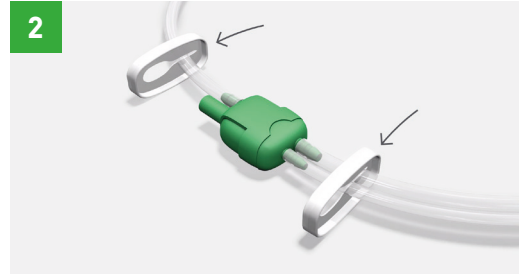


- 2
- Poussez les pinces jusqu'à proximité des raccords verts
  - Appuyez sur les deux pinces des tubulures

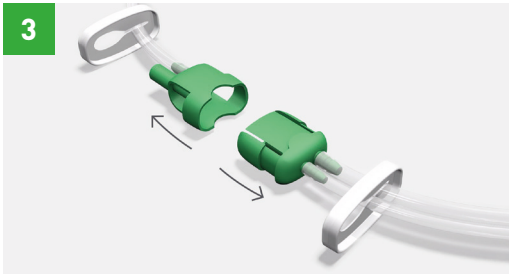

- 3
- Détachez la tubulure du réservoir de la tubulure du pansement
  - Placez l'appareil et le réservoir à bonne distance de la douche

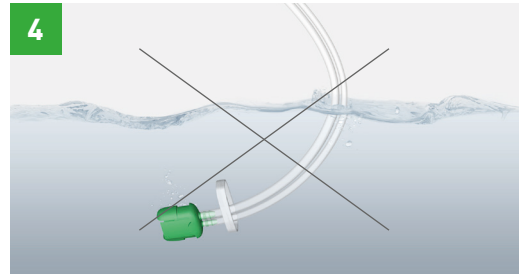

- 4
- Veillez à ce que la tubulure du pansement ne soit pas exposée au jet d'eau pendant la douche (couvrez le point de connexion vert avec une compresse stérile).

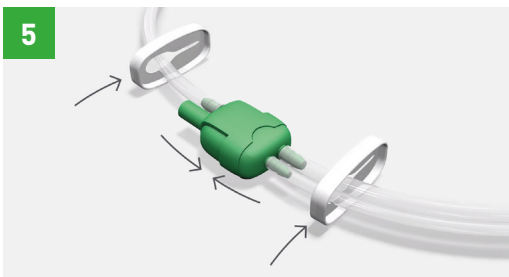

- 5
- Après la douche, raccordez à nouveau le pansement à la pompe et au réservoir
  - Branchez les raccords verts
  - Desserrez ensuite les deux pinces



- 6
- Redémarrez la thérapie en appuyant pendant deux (2) secondes sur le bouton de démarrage vert jusqu'à ce que la pompe soit activée et que le bouton clignote.

# Autres instructions d'utilisation d'Avance® Solo


## Remplacement du réservoir

En cas d'avertissement (« alarme de blocage »), vous pouvez voir à travers la fenêtre transparente au dos du réservoir si ce dernier devrait être remplacé. Pour remplacer le réservoir, veuillez procéder comme suit.

Testez toujours le remplacement du réservoir avec un professionnel de santé si vous bénéficiez pour la première fois de la thérapie Avance® Solo.




- 1
- Mettez la pompe sur pause en appuyant sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes.
  - La pompe émet deux signaux sonores pour confirmer le mode pause

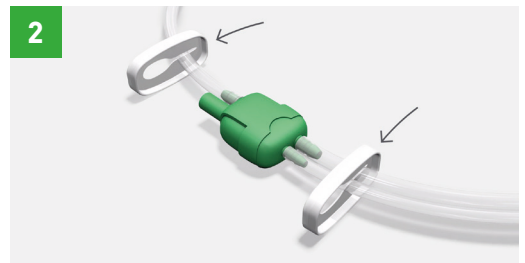

- 2
- Poussez les pinces jusqu'à proximité des raccords verts
  - Appuyez sur les deux pinces des tubulures et déconnectez les deux raccords verts



- 3
- Au dos de la pompe, détachez la tubulure du support
  - Appuyez fermement sur les brides en plastiques latérales du réservoir
  - Tirez dessus en les faisant légèrement osciller pour détacher le réservoir
  - Raccordez le nouveau réservoir
  - Le réservoir doit être correctement fixé pour être bien étanche

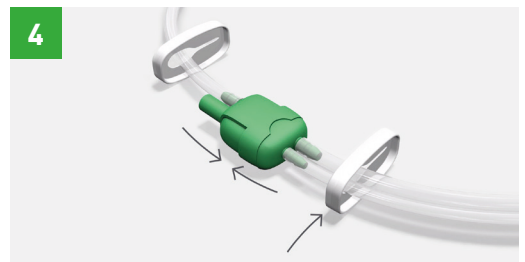

- 4
- Connectez à nouveau les deux raccords verts
  - Desserrez la pince de la tubulure du pansement
  - Démarrez à nouveau la pompe en appuyant sur le bouton de démarrage vert, puis en le relâchant au bout de deux (2) secondes.
  - Assurez-vous que de la pression négative est bien établie. Le pansement se contracte et est rigide au toucher.



## Remplacement des piles

Au bout de sept (7) jours ou si une alarme indique que les piles sont faibles, les deux (2) piles doivent être remplacées. Utilisez uniquement des piles au lithium AA 1,5 V GP15LF.

Pour remplacer les piles, procédez comme suit:

- Mettez la pompe en pause en appuyant sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes. La pompe émet deux signaux sonores pour confirmer le mode pause.
- Faites glisser le couvercle du compartiment des piles pour l'ouvrir.
- Enlevez les piles.
- Insérez des piles neuves et veillez à ce que le pôle positif (marqué d'un +) et le pôle négatif (marqué d'un -) de chaque pile correspondent au marquage +/- dans le compartiment des piles.
- Fermez le couvercle du compartiment des piles.
- Démarrez à nouveau la pompe en appuyant sur le bouton de démarrage vert, puis en le relâchant au bout de deux (2) secondes. Assurez-vous que de la pression négative est bien établie. Le pansement se contracte et est rigide au toucher.



## Nettoyage de l'appareil

Vous pouvez de temps en temps nettoyer la pompe en l'essuyant avec un chiffon humide. Ne l'exposez pas à l'eau courante.



**N'oubliez pas de visiter le site Avance Solo réservé aux patients!**

[www.molnlycke.ch/fr-ch/avanceforpatients](http://www.molnlycke.ch/fr-ch/avanceforpatients)



SCAN ME

## Que signifient les alarmes d'Avance® Solo ?

L'appareil émet différents signaux ou alarmes lorsqu'il fonctionne correctement ou lorsque vous devez prendre des mesures. Familiarisez-vous avec les différents signaux et alarmes. Veillez à toujours pouvoir les entendre et/ou les voir.

### Alarmes et élimination des défaillances

#### Causes possibles / Description des alarmes acoustiques et optiques

Un défaut d'étanchéité a été détecté:



- Le voyant lumineux « Fuite » (défaut d'étanchéité) clignote une fois par seconde.
- La pompe émet une alarme sonore répétée et le mode thérapie est interrompu.
- Il se peut que le pansement présente un défaut d'étanchéité, que l'adaptateur ne soit pas correctement connecté ou que le réservoir ne tienne pas fermement sur la pompe.

Un blocage a été détecté:



- Le voyant «Blocage» clignote une fois par seconde.
- La pompe émet une alarme sonore répétée et le mode thérapie est interrompu.
- Le réservoir est plein ou les tubulures sont obstruées.

Les piles sont faibles:



- La lampe témoin « Pile » clignote une fois toutes les cinq (5) secondes.
- Si le voyant lumineux des piles clignote chaque seconde et que la pompe émet à plusieurs reprises une alarme sonore, la durée restante de fonctionnement des piles est inférieure à 4 heures.

Alarme pour ERREUR INTERNE:



- Toutes les lampes témoins clignotent simultanément une fois par seconde et la pompe émet une alarme sonore répétée.
- Il n'est pas possible de démarrer la pompe.

**Remarque:** Les bruits pulsés réguliers que vous entendez sont parfaitement normaux et confirment que le système fonctionne.

## Élimination des défaillances

Pour remédier à un défaut d'étanchéité:

- Pour améliorer le contact avec la peau, appuyez sur les bords du pansement ou utilisez des bandes de fixation supplémentaires que vous collerez sur les bords.
- Vérifiez les connexions suivantes: entre le réservoir et la pompe, la tubulure du réservoir et le réservoir ainsi qu'entre la tubulure du pansement et la tubulure du réservoir (raccord vert).
- Appuyez sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes pour redémarrer la pompe.
- Si le défaut d'étanchéité persiste, la pompe émet une nouvelle alarme et interrompt à nouveau la thérapie. Dans ce cas, adressez-vous à votre professionnel de santé.

Pour supprimer un blocage:

- Vérifiez que les tubulures ne sont pas coincées ou clampées. Lorsque le réservoir est plein, remplacez-le conformément aux instructions données à la page 8 du présent document ou au point 7.3 du manuel utilisateur.
- Appuyez sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes pour redémarrer la pompe. Si le blocage persiste, la pompe émet une nouvelle alarme et interrompt la thérapie. Dans ce cas, adressez-vous à votre professionnel de santé.

Remplacez les piles:

- Remplacez les piles conformément aux instructions données à la page 9 du présent document ou au point 7.4 du manuel utilisateur.
- Utilisez uniquement le type et le modèle de piles au lithium fournies par Mölnlycke Health Care pour ce produit.
- Appuyez sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes pour redémarrer la pompe.

Contactez:

- Votre professionnel de santé ou
- Mölnlycke Health Care au numéro indiqué à la page 3.

# Proving it every day

Chez Mölnlycke®, nous proposons des solutions innovantes pour le traitement des plaies, l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité chirurgicales, et la prévention des escarres. Nos solutions contribuent à obtenir de meilleurs résultats et sont étayées par des preuves cliniques et médico-économiques.

Notre seul objectif: aider les professionnels de santé à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et nous nous engageons à le prouver tous les jours.

#### Sources:

1. Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdahl, A.M. et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care 2017; 26: 3, Suppl 3, S1–S113. 2. Willy C, Agarwal A, Andersen CA, Santis GD, Gabriel A, Grauhan O, Guerra OM, Lipsky BA, Malas MB, Mathiesen LL, Singh DP, Reddy VS. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int Wound J 2016; doi: 10.1111/iwj.12612.

Découvrez-en plus sur [www.molnlycke.ch/fr-ch](http://www.molnlycke.ch/fr-ch)

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Suisse. Tél.: + 41 44 744 54 00, [info.ch@molnlycke.com](mailto:info.ch@molnlycke.com)  
Les marques Mölnlycke, Avance et Safetac de même que les logos correspondants sont des marques déposées à l'échelle mondiale d'un ou de plusieurs membres du groupe de sociétés Mölnlycke Health Care. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. HQIM002846

