



BARRIER® Champ opératoire Cardio-Hybride

- **Gain de temps:** Un champ opératoire all-in-one réduit clairement le temps du drapage par rapport à un drapage avec plusieurs champs.¹
- **Drapage complet:** Un champ opératoire extra long de 4,5 m de longueur et de 2,4 m de largeur, couvre toute la table.
- **Adapté à l'intervention:** Positionnement idéal du film d'incision pour des interventions invasives minimales, des interventions fémoro-percutanées ainsi que la chirurgie ouverte
- **Matériaux résistants et absorbants:** Un patch renforcé tout au long du champ opératoire
- **Contrôle visuel:** Les côtés transparents latéraux permettent un contrôle visuel du panneau de commande et de l'arc C sans risque pour la stérilité.
- **Facile:** Il est possible de placer les instruments dans les poches des deux côtés du champ opératoire.

Instructions

Ces instructions sont destinées à la formation. Afin de préserver l'intégrité de la personne, le modèle porte des sous-vêtements, ce qui ne correspond pas aux directives de préparation du patient avant une opération.



1. Appliquez d'abord les champs adhésifs latéraux afin de déterminer la zone de travail.



2. Poussez le pli central vers le bas et enlevez le papier release. Placez le champ opératoire au milieu de la poitrine.



3. Placez le côté supérieur du film d'incision au même niveau ou plus haut que l'incisura jugularis. Fixez maintenant le film d'incision.



4. Dépliez le champ vers les côtés.




5. Enlevez le papier release.



6. Dépliez le champ et collez les films au niveau des plis inguinaux. Dépliez le pli du dessous jusqu'aux genoux.



7. Ensuite dépliez le champ opératoire vers les pieds.

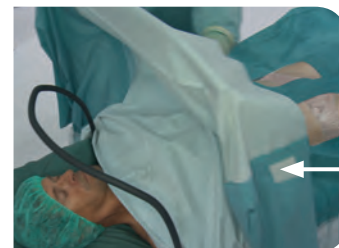

8. Dépliez le champ vers la tête. Des adhésifs sont prévus sous le champ pour une fixation sûre et facile à l'arceau d'anesthésie.

Réf.	Description	Conditionnement
61800	Trousse Cardio-Hybride 1 Champ opératoire Cardio-Hybride 240/300x450 cm, film d'incision 60x40 cm et 15x27 cm (2) 2 Champs opératoires adhésifs 75x75 cm 1 Champ de table 150x190 cm, 75x190 cm absorbant	5/10

Tous les composants de cette trousse sont disponibles pour les trousse ProcedurePak®.

For further information about Mölnlycke Health Care and this product scan the QR code below.

Champs opératoires BARRIER

- Matériaux 100% imperméables pour une sécurité optimale du patient
- Pliés de façon optimale et pour un emploi aseptique, utilisables par une seule personne en toute simplicité



References: 1. Data on file.

Find out more at www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72 boîte 2, B-2600 Berchem - Tél. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
www.molnlycke.com

Le nom et le logo de Mölnlycke Health Care, BARRIER® et ProcedurePak® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.

